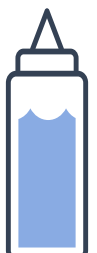
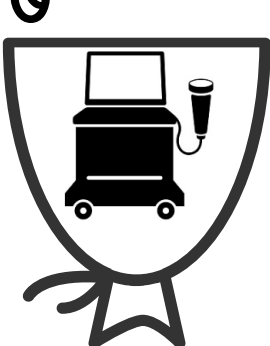
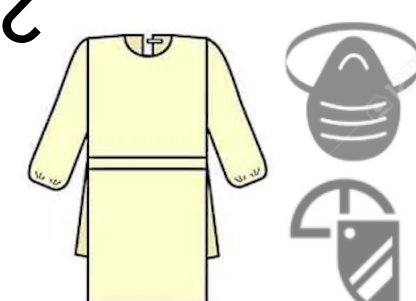
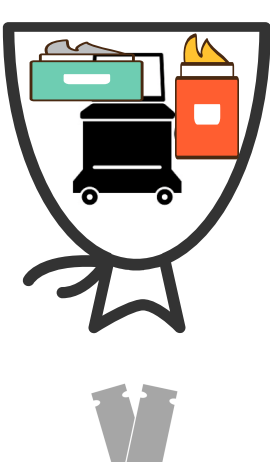


कोरोनावायरस [COVID-19] महामारी के दौरान शकट-आधारित अल्ट्रासाउंड प्रणाली की सुरक्षा और कीटाणुशोधन

पृष्ठ १

यह संलेख केवल एक दिशानिर्देश है। इसे उपलब्ध संसाधन और स्थानीय संक्रमण-नियंत्रण नीतियों के अनुसार संशोधित किया जाना चाहिए।


रोगी-कक्ष में प्रवेश के पूर्व

-  दस्ताने पहन लें
-  प्रणाली से सभी अनावश्यक सामान हटाएँ (जैसे अनावश्यक जाँच-यंत्र और तार) *
-  पोंछन से प्रणाली की सफ़ाई करें
-  प्रणाली को ढकने के पहले, उसपर महीन कागज़ (४) और पोंछन (३) रखें
-  जाँच-यंत्र पर जैल लगाएँ
-  जाँच-यंत्र को सुरक्षा आवरण से ढकें तथा इलास्टिक से बाँधें
-  प्रणाली को सुरक्षा आवरण से ढकें
-  निज-सुरक्षा उपकरण को दो जोड़े दस्तानों सहित पहनें
-  आवृत प्रणाली और जैल पैकेट रोगी-कक्ष में लाएँ
महीन कागज़ और पोंछन प्रणाली के आवरण के नीचे रहना चाहिए

रोगी-कक्ष के भीतर

-  रोगी की अल्ट्रासाउंड-जाँच करें
-  जाँच के उपरांत, जैल के पैकेट फेंक दें
-  दस्तानों को पहने-पहने उनका कीटाणुशोधन एलकोहॉल से करें
-  रोगी से २ मीटर की दूरी पर जाँच-यंत्र के आवरण को हटाएँ
 जाँच-यंत्र को प्रणाली के आवरण के अंदर सुरक्षित रूप से शकट पर टाँगे
 प्रणाली के आवरण को ऊपर की ओर मोड़ते हुए हटाएँ
दस्ताने वाले हाथों से अनावृत प्रणाली एवं जाँच-यंत्र को न छुएँ
-  बाहरी दस्तानों की जोड़ी को फेंक दें (यदि केवल एक ही जोड़ी हो, तो उसका कीटाणुशोधन एलकोहॉल से करें)
-  महीन कागज़ से जैल पोछें। पोंछन से संपूर्ण प्रणाली एवं जाँच-यंत्र को पोछें। महीन कागज़ और पोंछन को फेंक दें।
-  दस्तानों को पहने-पहने उनका कीटाणुशोधन एलकोहॉल से करें
-  द्वार खोल कर प्रणाली को बाहर खिसकाएँ (यदि संभव हो तो पैर से खिसकाएँ)

रोगी-कक्ष से निकास के उपरांत

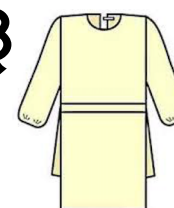-  दस्तानों को फेंक दें
-  हाँथों को भली प्रकार से धोएँ
-  मास्क एवं आंख-सुरक्षा उपकरण को पहने-पहने ही गाऊन को उतार कर फेंक दें
-  हाँथों को भली प्रकार से धोएँ
-  दस्तानों की नई जोड़ी पहनें
-  पोंछन से संपूर्ण प्रणाली एवं जाँच-यंत्र का कीटाणुशोधन करें। पोंछन को फेंक दें और प्रणाली को सूखने दें
-  दस्तानों को फेंक दें
-  हाँथों को भली प्रकार से धोएँ
-  बाकी बचे निज-सुरक्षा उपकरण उता

* अप्रयुक्त जाँच-यंत्रों को हटा कर सुरक्षित रखें

कोरोनावायरस[COVID-19] महामारीके दौरान शकट-आधारित अल्ट्रासाउंड प्रणाली की सुरक्षा और कीटाणुशोधन

पृष्ठ २

यह संलेख केवल एक दिशानिर्देश है। इसे उपलब्ध संसाधन और स्थानीय संक्रमण-नियंत्रण नीतियों के अनुसार संशोधित किया जाना चाहिए।

टिप्पणियाँ

- इस संलेख का उपयोग उन सभी रोगियों के लिए किया जाना चाहिए जिन्हें कोरोनावायरस बीमारी से संक्रमित होने की संभावना है या पुष्टि की गई है। इस संलेख का उपयोग ऐसी स्थिति में भी किया जा सकता है जहाँ किसी रोगी को संक्रामक बीमारी के लिए अलग किया गया हो।
- जिन रोगियों के लिए कोरोनावायरस बीमारी की संभावना कम है, और जहाँ रोगी परीक्षा के समय स्थानीय निर्देशानुसार निज-सुरक्षा उपकरण (गाऊन, दस्ताने, मास्क एवं आँख-सुरक्षा उपकरण) की आवश्यकता नहीं है, कृपया निर्माता एवं स्थानीय संक्रमण-नियंत्रण नीतियों के अनुसार यंत्र की सफाई करें।
- अल्ट्रासाउंड-सहित रोगी परीक्षा उन रोगियों को लाभान्वित कर सकता है जिन्हें वास्तविक या संभावित कोरोनावायरस बीमारी है। इसमें फेफड़े की पैथोलॉजी, कार्डियक फंक्शन, द्रव सहिष्णुता, संवहनी पट्टा / प्रक्रियात्मक मार्गदर्शन और श्वास प्रणाल इंटुबेशन की पुष्टि इत्यादि मूल्यांकन शामिल है।
- अल्ट्रासाउंड-सहित रोगी परीक्षा उन रोगियों को भी लाभान्वित कर सकता है जिन्हें गैर-कोरोनावायरस बीमारी संबंधित शिकायतें हैं और सहवर्ती कोरोनावायरस संक्रमण है।
- महामारी के दौरान इस परीक्षण की उपयोगिता बढ़ सकती है, क्योंकि सादे फिल्मों, सी.टी. स्कैन, रेडियोलॉजी वाला अल्ट्रासाउंड और इकोकार्डियोग्राफी की उपलब्धता सीमित रहेगी।
- जैसे-जैसे इस बीमारी की सामुदायिक संचरण बढ़ेगी, इससे संक्रमित रोगी श्वास एवं प्रश्वास संबंधित लक्षणों या बुखार के बिना उपस्थित हो सकते हैं। जब स्थानीय संक्रमण-नियंत्रण निर्देशानुसार, सभी रोगियों की परीक्षा के लिए, लक्षणों की परवाह किये बिना, निज-सुरक्षा उपकरण का उपयोग आवश्यक हो, तब सभी अल्ट्रासाउंड-सहित रोगी परीक्षा के दौरान, इस संलेख का उपयोग किया जाना चाहिए।
- यदि सख्त संक्रमण-नियंत्रण संलेख का पालन नहीं किया जाता है, तो पूर्वकथित परीक्षा हानिकारक भी हो सकता है। अल्ट्रासाउंड यंत्र, उपयोगकर्ता और जेल के द्वारा संक्रमण की संभावना है, जिससे रोगी एवं चिकित्सक को खतरा है।
- हस्त-धारित यंत्र का ही उपयोग पर विचार करें क्योंकि इन्हें संदूषण से बचाना और कीटाणुरहित करना अधिक सरल है।

परिभाषाएँ

- **शकट-आधारित प्रणाली :** कोई भी अल्ट्रासाउंड सिस्टम जो किसी गाड़ी पर हो। इस सिस्टम में प्रदर्शन, जाँच-यंत्र, कीबोर्ड, ट्रे और बिजली का तार भी शामिल है।
- **पोंछन :** सफाई की आपूर्तियाँ यानी घोल एवं पोंछन। पोंछन की रासायनिक संरचना प्रत्येक प्रणाली के निर्माता के निर्देशानुसार होनी चाहिए और कोरोनावायरस को खत्म करने में प्रभावी होनी चाहिए। प्रणाली की सफाई इसके सारे बाह्य उपकरणों के साथ होनी चाहिए (प्रदर्शन, जाँच-यंत्र, कीबोर्ड, ट्रे और बिजली के तार)।

सुझाव

- इस सफाई संलेख का मुख्य अवधारणा है - प्रणाली के उपयोग के पहले एक बार, तथा उपयोग के बाद दो बार, संपूर्ण प्रणाली को पूरी तरह से पूर्वकथित पोंछन से पोंछना।
- बिन-दस्ताने वाले हाथों से कुछ भी गंदा नहीं छूना चाहिए। संदेह होने पर, फिर से हाथ धोएं।
- हमेशा दस्ताने वाले हाथों से ही यंत्र को छुएं।
- उन सभी रोगियों के लिए, जिन्हें कोरोनावायरस बीमारी से संक्रमित होने की संभावना है या पुष्टि की गई है, एक समर्पित प्रणाली के प्रयोग का विचार करें। अन्य रोगियों के लिए भिन्न प्रणाली के उपयोग से पार-संदूषण एवं संक्रमण के प्रचार की संभावना कम होगी।
- यदि जाँच-यंत्र या प्रणाली के आवरण उपलब्ध नहीं है, तो किसी भी पारदर्शी प्लास्टिक बैग का उपयोग करें। इन आवरणों का जीवाणुरहित होना आवश्यक नहीं है।
- यदि जाँच-यंत्र या प्रणाली के आवरण उपलब्ध नहीं है, तो इस संलेख का विधि पूर्वक अनुगमन करना चाहिए (आवरण-संबंधी निर्देशों को छोड़ कर)।
- जेल की पूरी बोतल और सारे पोंछन अपने साथ न लाएँ, केवल उतना ही लाएँ जितना एक रोगी के लिए आवश्यक हो।
- पृष्ठ १ का संलेख केवल एक दिशानिर्देश है। इसे उपलब्ध संसाधन और स्थानीय संक्रमण-नियंत्रण नीतियों के अनुसार संशोधित किया जाना चाहिए।